

Anleitung zum Umzug der HRV-Scanner Software inkl. aller Daten auf einen neuen PC

Neuinstallation

Sie können die HRV-Scanner Software aus dem aktuellen Setup auf einem neuen PC installieren.

Das aktuelle Setup finden Sie unter:

https://www.biosign.de/download_HRVScanner/HS_Setup.exe

Bitte beachten Sie, dass es evtl. Probleme geben kann, wenn Ihre Update-Lizenz abgelaufen ist. Dann kann die aktuelle Version ohne eine Verlängerung der Update-Lizenz nicht ausgeführt werden. In diesem Fall können Sie die Update-Lizenz jederzeit für ein weiteres Jahr verlängern.

Um Daten (Probanden, Messungen, ...) aus einer vorhandenen Installation zu übernehmen empfehlen wir:

- *Datensicherung am alten PC und Einlesen dieser Datensicherung auf dem neuen PC*

oder

- *Umzug des gesamten HRV-Scanner Verzeichnisses vom alten auf den neuen PC*

Umzug des alten HRV-Scanner Verzeichnisses auf einen neuen PC

Schritt 1

Kopieren Sie das HRV-Scanner Verzeichnis auf dem alten Rechner (meist C:\HRVScanner) inklusive aller Unterverzeichnisse auf einen externen Datenträger (USB-Stick, externe Festplatte)

Schritt 2

Führen Sie eine Neuinstallation der HRV-Scanner Software wie oben beschrieben auf dem neuen Rechner durch (empfohlen nach C:\HRVScanner).

Schritt 3

Fügen Sie das in Schritt 1 auf einen externen Datenträger kopierte HRV-Scanner Verzeichnis auf dem neuen PC in die Neuinstallation (falls beim Setup nicht abweichend angegeben C:\HRVScanner) ein.