

Liebe HRV-Scanner-Anwender,

im aktuellen Software-Update für den HRV-Scanner (V 3.04.15) und den HRV-Scanner lite (V 1.00.27) haben wir ein paar Neuerungen eingefügt, auf die wir hier kurz hinweisen möchten:

Templates in der Langzeit-HRV Messung

Wir haben die Langzeit-HRV auf die Auswertung mit konfigurierbaren Templates umgestellt. Templates erweitern die Analysemöglichkeiten des HRV-Scanners. Statt bisher maximal drei Phasen können nun für jede Messung bis zu 30 verschiedene Abschnitte definiert und analysiert werden.

Mehr Info dazu finden Sie in der aktualisierten HRV-Scanner Dokumentation in "Arbeiten mit Templates" ab Seite 73.

Die aktualisierte Dokumentation finden Sie als PDF entweder auf unserer Webseite unter "HRV-Scanner" - > "Downloads" (<https://www.biosign.de/hrv-scanner/downloads/>) oder in der Software direkt:

- HRV-Scanner standard: Hauptmenü -> *Hilfe* -> *Dokumentation HRV-Scanner*

- HRV-Scanner lite: Hauptmenü *System* -> *Dokumentation HRV-Scanner*

Automatisch Auswerten

Auswahl der auszuwertenden Messungen jetzt auch nach Messungstyp

Qiu-Modul - Qiu Messungen

Bisher konnten die verschiedenen Biofeedback-Arten nur getrennt im Verlauf dargestellt werden. Jetzt ist es möglich alle Biofeedbackmessungen zusammen darzustellen.

HRV-Verlauf - Bild kopieren / Bild speichern

Beim Export des HRV-Verlaufs als Bild ist es jetzt möglich die gewünschte Größe anzugeben

Verlängerung der möglichen Dauer einer Biofeedback-Sitzung (3D-Biofeedback, Online-Spektrum, Rhythmisierung)

Die Dauer 45, 60, 75 und 90 Minuten sind jetzt möglich.

Darstellung der HRV-Scanner lite Software bei hohen Auflösungen verbessert

Die Darstellung der HRV-Scanner lite Software wurde an hohe DPI-Werte (> 125%) angepasst.

Umstellung unserer Homepage auf SSL

Um Ihnen auch beim Surfen auf unserer Homepage und bei Kontakt über unsere Formulare Sicherheit zu gewährleisten, ist ab jetzt der Zugriff auf unsere Website durch SSL-Verschlüsselung geschützt.

Sie haben einen Newsletter verpasst?

Kein Problem! Ab jetzt finden Sie alle vorherigen Newsletter in unserem Newsletter-Archiv unter:

<https://www.biosign.de/hrv-scanner/videos/>

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Beise und Markus Hofer



BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen

Tel.: +49 8121 923894
Fax: +49 8121 923893

info@biosign.de
www.biosign.de

Sitz: Ottenhofen
Registergericht: München HRB 135220
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Beise

*(*Um den HRV-Scanner Newsletter abzubestellen antworten Sie bitte auf diese Mail und tragen "Abbestellen" ein.)*