


## Anleitung zum Update der myQiu Software


In der myQiu Software gibt es zwei Möglichkeiten die Software upzudaten:

### Automatische online Update

Um das automatische Update auszuführen, muss der Computer, auf dem die myQiu Software installiert ist, über eine Verbindung mit dem Internet verfügen. Aktivieren Sie das automatische Update in den Systemeinstellungen.

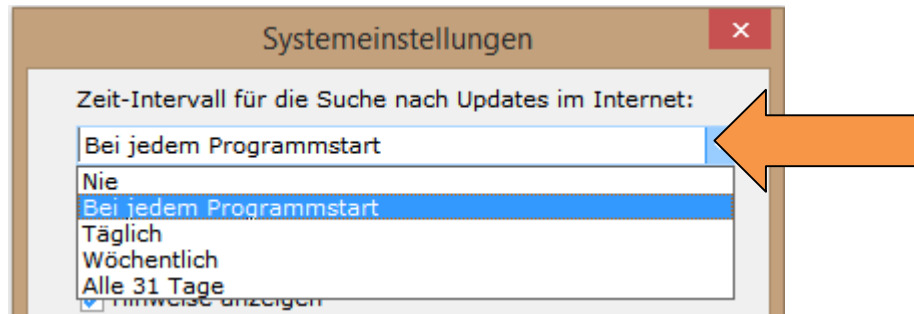


Geben Sie hier an, in welchem Zeitintervall im Internet nach Updates gesucht werden soll, oder starten Sie das Online-Update manuell (System -> Updates installieren).

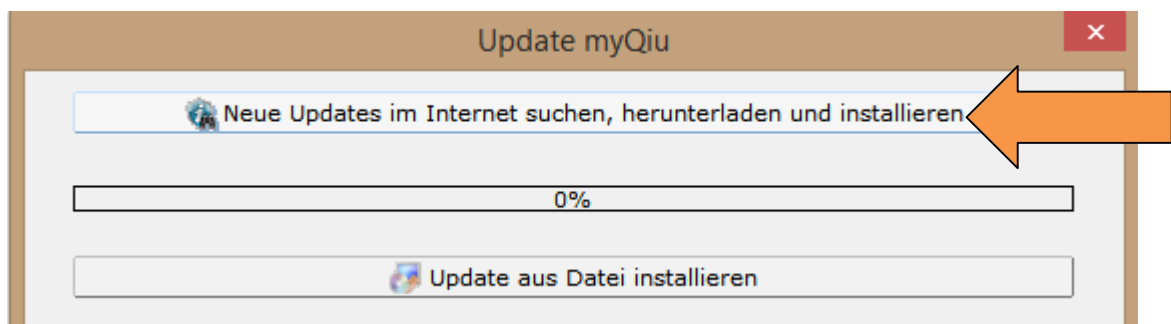

Führen Sie die Schritte zum Online-Update aus, wenn ein neues Update im Internet gefunden wurde.

### Manuelles Update aus einer Update-Datei

Laden Sie sich die aktuelle Update-Datei aus dem Internet herunter. Gehen Sie dazu auf die Internetseite der BioSign GmbH ([www.biosign.de](http://www.biosign.de)). Unter „Service – Download“ finden Sie den Link zur aktuellen Update-Datei. Laden Sie diese Datei herunter und speichern Sie diese auf einem Datenträger (z.B. USB-Stick), wenn Sie die das Update auf einem Rechner installieren möchten, der nicht über eine eigene Internetverbindung verfügt.

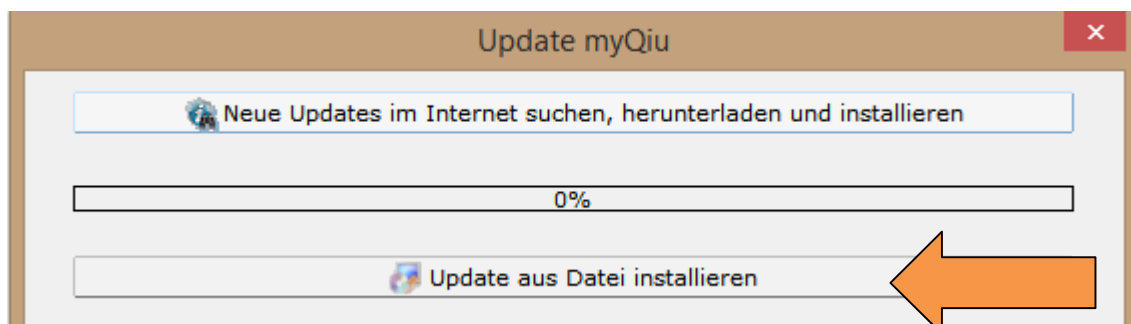

Gehen Sie in myQiu zu „System – Updates installieren“ und wählen Sie „Update aus einer Datei installieren“. Wählen Sie die aus dem Internet heruntergeladene Datei aus und installieren Sie das Update. (Hinweis: Die Update-Datei ist ein ZIP-Archiv und darf nicht extrahiert werden.)

Bei Fragen zum Update oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wenden Sie sich bitte an: [info@biosign.de](mailto:info@biosign.de)