


## Installation des Qiu-Treibers

Der Qiu wird mittels USB mit dem PC verbunden und erfordert deshalb einen geeigneten USB-Treiber. Gelegentlich lassen es eingeschränkte Benutzerrechte oder manche Virens Scanner nicht zu, dass der Qiu-Treiber bereits während der Installation der Qiu-Software korrekt installiert wird. In diesem Fall hilf die manuelle Installation des Qiu-Treibers.

1. Beenden Sie die Qiu-Software und trennen Sie die USB-Verbindung zum Qiu.
2. Den jeweils aktuellsten Treiber können Sie hier herunterladen:  
[http://www.biosign.de/download\\_Qiu/QiuDriverSetup.exe](http://www.biosign.de/download_Qiu/QiuDriverSetup.exe)
3. Bitte merken Sie sich den Ordner auf Ihrem PC, in dem die Treiber-Datei gespeichert wird.
4. Starten Sie nach dem Herunterladen den Windows-Explorer und wechseln Sie in den Ordner, wo sich die Datei jetzt befindet.
5. Klicken Sie mit **rechten** Maustaste auf die Treiber-Datei und führen Sie die Installation als Administrator aus.

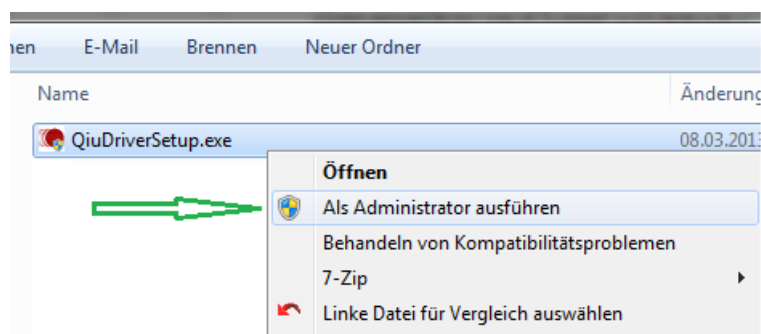

6. Nach Ausführen der Installation Ihren PC bitte neu starten.
7. Verbinden Sie nun Ihren Qiu mit dem PC. Der neue Qiu-Treiber wird nun von Ihrem Windows-System geladen. Dieser Vorgang kann einige Sekunden bis wenige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte brechen Sie diesen Vorgang nicht ab.
8. Starten Sie nun die Qiu-Software. Der Qiu sollte nun von der Software korrekt erkannt werden.

Sollten weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt mit BioSign auf, um weitere technische Unterstützung zu erhalten.